

Leia a instrução de uso antes de utilizar.

Verifique que possui todos os materiais necessários para a realização do teste.


Todos os componentes devem ser colocados à temperatura ambiente (entre 15-30 °C) antes do teste.

## 1 PREPARO DA SOLUÇÃO


Adicione 10 gotas do tampão de extração no tubo de extração.



Coloque na base:

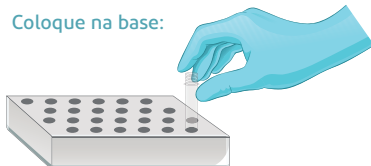


## 2 COLETA DA AMOSTRA

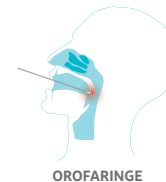


## 3 PREPARO DA AMOSTRA

Insira o swab com a amostra dentro do tubo. Gire 5x pressionando a ponta do swab contra a parede do tubo.

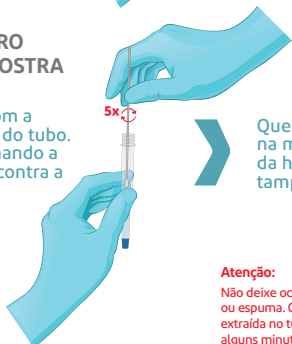

Quebre o swab na marcação da haste e tampe o tubo.

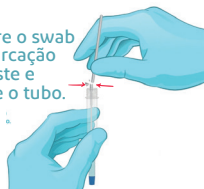

### Atenção:

Não deixe ocorrer a formação de bolhas ou espuma. Caso tenha formado, permita que a amostra após extraída no tubo com o tampão permaneça em repouso por alguns minutos até que as bolhas ou espuma se desfaçam.


## 4 APLICAÇÃO DA AMOSTRA



Vire o tubo e abra a tampa do gotejador.

Atenção, não abra com o gotejador voltado para baixo.

Coloque o cassete em uma superfície limpa e plana e adicione 3 gotas em cada cavidade "S".

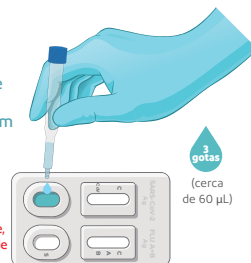

### Atenção:

Dispense gota a gota no cassete, cuidadosamente, a fim de que a quantidade correta seja dispensada.

## 5 AGUARDE...

Tempo de reação

**15 min**




Atenção:  
Não interprete o resultado após 20 minutos.

## 6 RESULTADO

Leia em até 20 minutos

### Covid

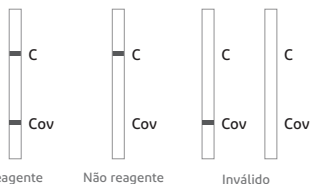

### Influenza A e Influenza B

