

Leia a instrução de uso antes de utilizar.


Verifique que possui todos os materiais necessários para a realização do teste.

Todos os componentes devem ser colocados à temperatura ambiente (entre 15-30°C) antes do teste.

1 PREPARO DO CASSETE

Abra o envelope e coloque o cassete em uma superfície limpa plana. Identifique-o.



Identifique o cassete

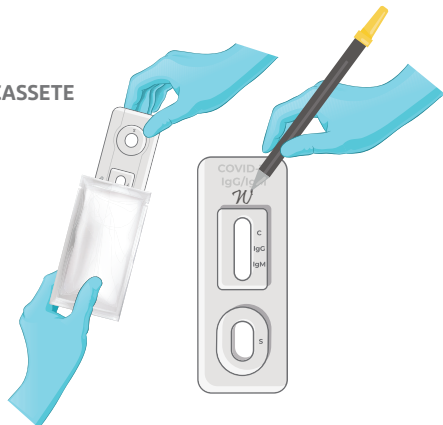

2 COLETA DA AMOSTRA

Realize a punção do dedo utilizando a lanceta e descarte-a.

Limpe a primeira gota de sangue, depois utilizando a pipeta colete 1 gota da amostra (aprox. 10µL)

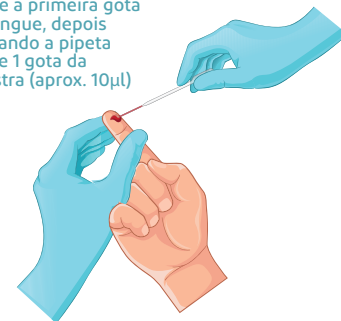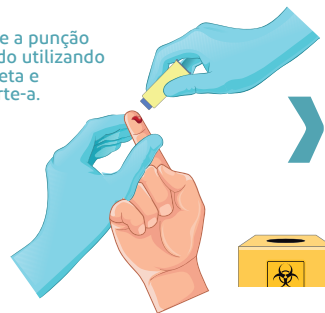

3 APLICAÇÃO DA AMOSTRA


Dispense 1 gota (aprox 10µL) na cavidade da amostra (S) e descarte a pipeta.

Adicione 2 gotas (80µL) de diluente e inicie o cronômetro.


AGUARDE...




4 RESULTADO

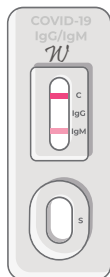

Reagente

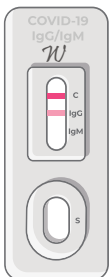

Não reagente

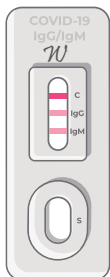

Inálido



proxima

vyttra

diagnósticos

Vyttra Diagnósticos Importação e Exportação S.A.
Av. Queiroz Filho, 1560 – Torre Gaivota – 4º andar
São Paulo-SP – BR - 05319-000
Tel.: +55 11 4280 7500

Suporte técnico e científico:
0800 723 5015
WhatsApp: (11) 99738 9296
digitalcare@vyttra.com